

Pink Superjutīgs grūtniecības tests vidējā plūsmā

Vidējā plūsmas grūtniecības tests lietošanai mājās.

Paškontroles ierīce.

IEVADS

„Pink Midstream Super Sensitive” ir ātrs un ļoti jutīgs grūtniecības tests, kas paredzēts cilvēka horioniskā gonadotropīna (hCG) – hormona, kas atrodams grūtnieču urīnā – noteikšanai. „Pink Midstream Super Sensitive” testa jutīgums ir noteikts pie 10 mIU/ml. Grūtniecības testa princips balstās uz hCG hormona reakciju grūtnieces urīnā ar monoklonālajiem anti-hCG antivielām, kas tika izmantotas testa veikšanai. „Pink Midstream Super Sensitive” testa veikšana ir ļoti vienkārša – pietiek ar testa galiņu novietot zem urīna straumes, un rezultāts krāsainu svītru veidā rezultātu lodziņā būs redzams 1–4 minūšu laikā.

KOMPLEKTA SATURS

Komplektā ir aprīkojums viena testa veikšanai:




- » 1 Hermētisks folijas maisiņš, kurā ir: 1 vidējās urīna plūsmas tests un 1 absorbents.
- » 1 Iepakojuma lapa ar instrukcijām

Pirms testa veikšanas sagatavojiet pulksteni, kas būs nepieciešams testa rezultāta lasīšanas laika mērīšanai.

TESTA VEIKŠANA

Pētījumam vislabāk piemērots ir rīta urīns, jo satur visvairāk hCG hormona

» Tieši pirms testa veikšanas atveriet folijas maisiņu, to pārplēšot. Izņemiet vidējās plūsmas testu no maisiņa un iepazīstieties ar tā uzbūvi. Maisiņā ir arī absorbents, kas jāizmet sadzīves atkritumos.

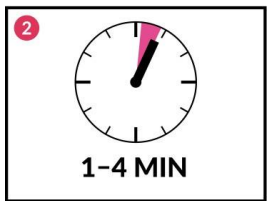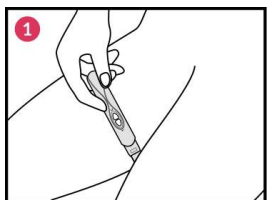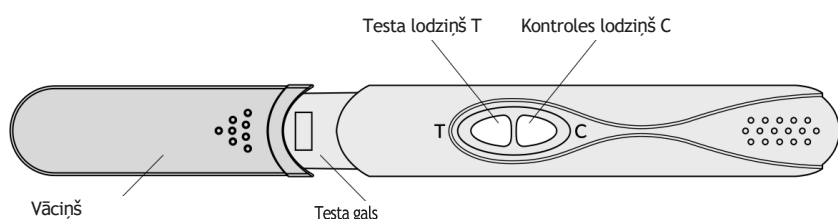

» Noņemiet vāciņu un turiet testa galu zem urīna plūsmas vismaz 10 sekundes. Varat arī savākt urīnu sausā un tīrā traukā un iemērkēt testa galu tajā vismaz 10 sekundes.

» Izņemot testa galu no urīna parauga, aizveriet vāciņu un novietojiet testu uz līdzenas virsmas tā, lai būtu redzami abi lodziņi (T un C). Uzraugiet urīna parauga plūsmu caur testa zonu T un kontroles zonu C. Pagaidiet, līdz lodziņos parādās krāsainas svītras.

» Nolasiet testa rezultātu 1–4 minūtes pēc testa gala iemērkšanas urīnā. Ja krāsainā svītra neparādās, pagaidiet vēl 1 minūti

» Rezultātus, kas nolasīti pēc vairāk nekā 10 minūtēm, vajadzētu ignorēt.

TESTA REZULTĀTU SKAIDROJUMS



NEGATĪVS REZULTĀTS (GRŪTNIECĪBA NAV)

Parādās kontroles C svītra, testa T svītra neparādās. Šāds rezultāts liecina, ka, visticamāk, neesat stāvoklī.



POZITĪVS REZULTĀTS (GRŪTNIECĪBA)

Parādās divas atšķirīgas svītras: testa zonā T un kontroles zonā C. Svītras T krāsas intensitātei nav nozīmes — tā var būt tāda pati, vājāka vai stiprāka nekā svītras C krāsas intensitāte. Šis rezultāts liecina, ka, visticamāk, esat stāvoklī.

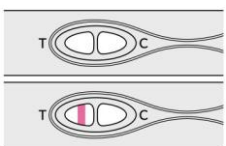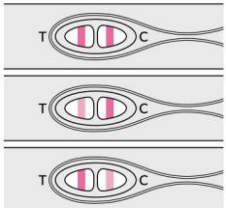

NEPAREIZS REZULTĀTS

Ja svītras neparādās vai redzama tikai T svītra, testa rezultāts ir nederīgs, un tests jāatkārto, izmantojot jaunu grūtniecības testu, stingri ievērojot lietošanas instrukciju

PIEDOMAS PASĀKUMI

- » Tests paredzēts tikai ārējai lietošanai.
- » Testu jāuzglabā temperatūrā no 2 līdz 30 °C. Nedrīkst sasaldēt.
- » Nelietojiet testa pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz iepakojuma.
- » Nelietojiet testa, ja folijas maisiņš ir bojāts, jo gaisā esošā mitrums varētu būt bojājis testu.
- » Tests paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.
- » Izlietoto testu izmetiet kopējā sadzīves atkritumu konteinerā.
- » Turiet testu bērniem nepieejamā vietā.

Veicot grūtniecības testu, neveiciet nekādas medicīniskas darbības bez konsultācijas ar ārstu.

ATBILDES UZ VISBIEŽĀK UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM

Kā darbojas grūtniecības tests?

Grūtniecības tests urīnā atklāj hCG hormonu (cilvēka horionisko gonadotropīnu). Sievietes organisms sāk ražot šo hormonu grūtniecības laikā. Grūtniecības progresēšanas laikā hCG hormona līmenis urīnā palielinās.

Kad man būtu jāveic grūtniecības tests, ja domāju, ka esmu stāvoklī?

Pink Midstream Super Sensitive” grūtniecības testu var veikt jau 6 dienas pēc paredzamās apaugļošanas. Tomēr vislabāk to veikt pirmajā dienā pēc paredzamās mēnešreižu sākuma.

Vai man jāizmanto rīta urīns?

„Pink Midstream Super Sensitive” testu var veikt jebkurā diennakts laikā, taču vislabāk izmantot rīta urīnu, jo tajā ir visvairāk hCG hormona.”

Cik precīzs ir „Pink Midstream Super Sensitive” grūtniecības tests?

Klīniskie pētījumi rāda, ka „Pink Midstream Super Sensitive” grūtniecības tests ir vairāk nekā 99 % precīzs.

Kāda ir „Pink Midstream Super Sensitive” grūtniecības testa jutība?

Pink Midstream Super Sensitive” nosaka hCG hormonu, kura koncentrācija ir vienāda ar lielāka par 10 mIU/ml. „Pink Midstream Super Sensitive” tests ir standartizēts saskaņā ar PVO (Pasaules Veselības organizācijas) starptautisko standartu.

Pētījumi ir parādījuši, ka „Pink Midstream Super Sensitive” testa rezultātus neietekmē LH (līdz 300 mIU/ml), FSH (līdz 1000 mIU/ml) un TSH (līdz 1000 µIU/ml) hormoni.

Kā zināt, vai tests darbojas pareizi?

Krāsainas svītras parādīšanās kontroles zonā C norāda, ka jūsu izmantotais tests darbojas pareizi. Kontroles svītras C esamība arī apliecina, ka tests tika veikts pareizi.

Kādi faktori var ietekmēt grūtniecības testa rezultātu?

Zāļu, kas satur hCG hormonu (piemēram, Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL), lietošana var izraisīt kļūdaini pozitīvu rezultātu. Alkohols, perorālie kontracepcijas līdzekļi, pretsāpju medikamenti, antibiotikas vai hormonālie preparāti, kas nesatur hCG, parasti neietekmē testa rezultātu. Turklāt noteiktos veselības stāvokļos, piemēram, ar olnīcu cistām, ārpusdzemdes grūtniecību vai sievietēm menopauzes laikā, hCG līmenis var paaugstināties, kas var radīt kļūdaini pozitīvu rezultātu. Spontāni aborti arī var ietekmēt grūtniecības testa rezultātu.

Ko darīt, ja grūtniecības tests uzrāda, ka neesmu stāvoklī?

Ja grūtniecības testa rezultāts ir negatīvs, urīnā nav konstatēts hCG, un, visticamāk, jūs neesat stāvoklī. Ja menstruācijas nesākas nedēļas laikā, veiciet jaunu grūtniecības testu. Ja rezultāts atkal ir negatīvs un menstruācijas joprojām nav sākušās, konsultējieties ar ārstu.

Ko darīt, ja grūtniecības tests uzrāda, ka esmu stāvoklī?

Pozitīvs grūtniecības testa rezultāts nozīmē, ka jūsu urīnā ir konstatēts hCG hormons, un, visticamāk, esat stāvoklī. Jums vajadzētu vērsties pie ārsta, lai apstiprinātu grūtniecību un uzzinātu, kā rīkoties tālāk.

Iepakojuma lapas pēdējo reizi pārskatīts: 2022-06-20
Tulkojuma datums: 2023-11-13 5.
versija AT/EN

SIMBOLI

CE 1434

	Pirms testa veikšanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.		Tikai in vitro diagnostikai
	Vienreizējai lietošanai		Uzglabāt temperatūrā no 2 līdz 30 °C
	Partijas numurs		Derīguma termiņš


Ražotājs:
Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.
Aleja Stanów Zjednoczonych 61A
04-028 Warsaw, Poland
www.hydrex.pl
www.controly.eu


medical devices