

Pink DUO

grūtniecības testi: kasetes tests + plūsmas tests

2
testy

Medicīnas ierīce pašpārbaudei

IEVADS

„Pink DUO 2” grūtniecības testi – kasetes un plūsmas testi – ir ātri un ļoti jutīgi grūtniecības testi, kas paredzēti cilvēka horiona gonadotropīna (hCG), hormona, kas atrodams grūtnieču urīnā, noteikšanai. Šo grūtniecības testu darbības princips balstīts uz hCG hormona reakciju ar monoklonālajām anti-hCG antivielām, kas izmantotas testu veikšanai.

„Pink Super Sensitive” plūsmas grūtniecības testa jutīgums ir noteikts kā 10 mIU/ml, savukārt „Pink” kasetes grūtniecības testa jutīgums – 20 mIU/ml.

IEPAKOJUMA SATURS

Iepakojumā ir aprīkojums, kas nepieciešams 2 testu veikšanai:

- » 1 noslēgts folijas maisiņš, kurā ir: 1 rozā ļoti jutīgs grūtniecības tests un 1 žāvēšanas līdzeklis
- » 1 noslēgts folijas aploksnis, kurā ir: 1 rozā grūtniecības testa kasetīte, 1 plastmasas pipete un 1 žāvēšanas līdzeklis
- » veikšanas instrukcija

Pirms testa veikšanas jums jāgatavo pulkstenis, kas būs nepieciešams testa rezultāta lasīšanai.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI



- » Testi paredzēti tikai ārējai lietošanai.
- » Testus jāglabā temperatūrā no 2 līdz 30 °C. tos nedrīkst sasaldēt.
- » Testu, kas glabāts ledusskapī, pirms testa veikšanas atstājiet uz pusstundu istabas temperatūrā.
- » Nelietojiet testa pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz iepakojuma.
- » Nelietojiet testu, ja folijas maisiņš ir bojāts, jo mitrums gaisā var būt bojājis testu.
- » Testi paredzēti tikai vienreizējai lietošanai.
- » Lietotu testu izmest tāpat kā jebkuras citas sadzīves atkritumus.
- » Testus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- » Pēc grūtniecības testa veikšanas neveiciet nekādas medicīniskas darbības bez konsultēšanās ar ārstu.

I SOLIS: rozā ļoti jutīgs grūtniecības tests ar plūsmu

VEICINĀT TESTU (veiciet, ja aizdomājaties, ka esat stāvoklī)

Rīta urīns ir vispiemērotākais testam, jo tajā ir visvairāk hCG hormona.


- » Pirms paša testa atvēršanas atveriet folijas maisiņu. izņemiet testa strēmeli no maisiņa un iepazīstieties ar tās struktūru. Maisiņā ir arī žāvēšanas līdzeklis, kuru jāizmet kopā ar sadzīves atkritumiem.

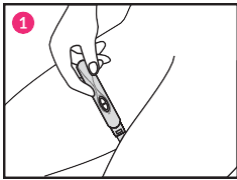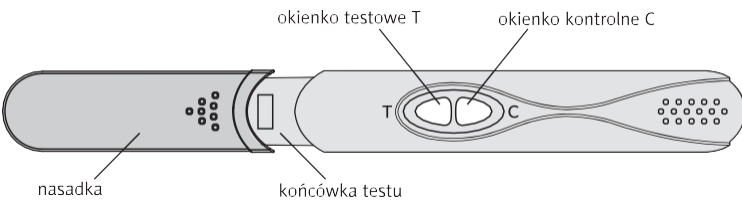

- » Noņemiet vāciņu un turiet testa galu urīna plūsmā vismaz 10 sekundes. ❶ Jūs varat arī savākt urīnu sausā, tīrā traukā un vismaz 10 sekundes iemērkāt testa galu tajā.


- » Pēc testa gala noņemšanas no urīna, uzlieciet vāciņu un novietojiet testu uz horizontālas virsmas tā, lai būtu redzami abi testa logi.

- » Novērojiet urīna paraugu, kas kustas caur testa zonu (T) un kontroles zonu (C). gaidiet, līdz lodziņos parādās krāsainas līnijas.

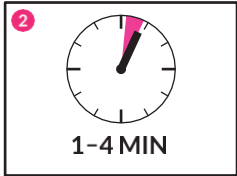


- » testa rezultātu nolasiet 1–4 minūtes pēc tam, kad testa gals iemērķts urīnā ❷. Ja krāsainā līnija neparādās, pagaidiet vēl 1 minūti.
- » **Nerēķiniet rezultātu, kas iegūts pēc vairāk nekā 10 minūtēm.**

TESTA REZULTĀTU SKAIDROJUMS

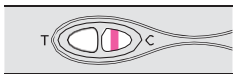


NEGATĪVS REZULTĀTS (grūtniecība nav konstatēta)

Kontroles c josla parādās, bet testa t josla ne. šis rezultāts liecina, ka, visticamāk, neesat stāvoklī.

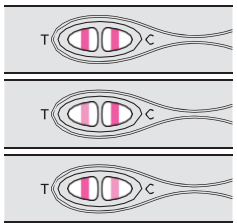

POZITĪVS REZULTĀTS (grūtniecība)

Parādās divas skaidras līnijas: testēšanas zonā T un kontroles zonā C. T līnijas krāsas intensitātei nav nozīmes, tā var būt tāda pati, vājāka vai stiprāka nekā C līnijas krāsas intensitāte. Šis rezultāts norāda, ka, visticamāk, esat stāvoklī.

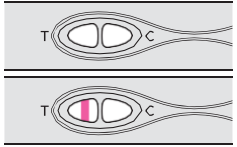

NEPAREIZS REZULTĀTS


Jei juostelēs neatsiranda arba atsiranda tik T juostelē, testo rezultatas yra negaliojantis ir testą reikia pakartoti naudojant naują nėštumo testą, atidžiai laikantis naudojimo instrukcijas.

II SOLIS: Pink grūtniecības testa kasetīte


PINK TESTS (veiciet to pēc paredzamajām mēnešreizēm)

Tests tiek veikts ar svaigi savāktu urīnu. vislabāk izmantot rīta urīnu, jo tajā ir vislielākā hCG hormona koncentrācija. urīnu jāsavāc tīrā, sausā traukā.

- » Pirms paša testa atvēršanas atveriet folijas maisiņu. izņemiet no maisiņa testa strēmeli un plastmasas pipeti. maisiņā ir arī žāvēšanas līdzeklis, kuru jāizmet kopā ar sadzīves atkritumiem.
- » Novietojiet testa kasetīti uz horizontālas virsmas.

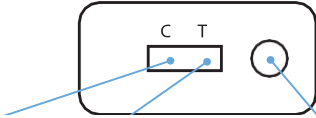


Kontroles zona – Testa zona – Lodziņš urīna paraugam pilināšanai

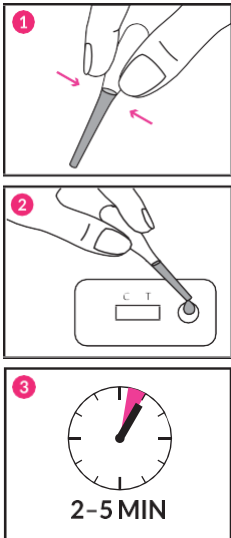


- » Iemērciet plastmasas pipetes galu urīnā, kas paredzēts testēšanai. **1** Saspiežot pipetes augšējo daļu, piepildiet to ar urīnu.
- » Lai nodrošinātu pareizu testa veikšanu, turiet pipeti vertikāli, aptuveni 1 cm virs testa kasetes virsmas, lai veidotos lieli, brīvi krītoši pilieni bez gaisa burbuļiem. Ielēnām iepiliniet 3 pilnus urīna pilienus apaļajā lodziņā uz testa kasetes. **2**
- » Vērojiet, kā testējamais urīna paraugs pārvietojas caur testa T un kontroles C zonām filtra papīrā.
- » Gaidiet, līdz rezultātu lodziņā parādās krāsainas joslas. testa rezultātu nolasiet 2–5 minūtes pēc urīna iepilināšanas apaļajā lodziņā uz testa kasetes. **3**
- » Ja neparādās neviena krāsaina līnija, pagaidiet vēl 1 minūti. nevērtējiet rezultātu, kas iegūts pēc vairāk nekā 10 minūtēm.




TESTA REZULTĀTU SKAIDROJUMS

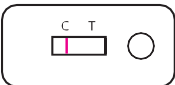

Negatīvs rezultāts (grūtniecības nav)
Parādās C kontroles līnija, bet T testa līnija neparādās. šis rezultāts norāda, ka, visticamāk, neesat stāvoklī.

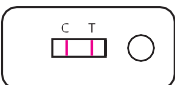

Pozitīvs rezultāts (grūtniecība)
Parādās divas atšķirīgas līnijas: testa zonā (T) un kontroles zonā (C). t līnijas krāsas intensitātei nav nozīmes; tā var būt tāda pati, vājāka vai stiprāka nekā c līnijas krāsas intensitāte. šis rezultāts norāda, ka, visticamāk, esat stāvoklī.

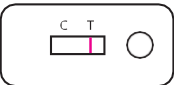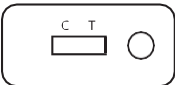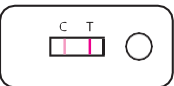

Nepareizs rezultāts
Ja joslas neparādās vai parādās tikai t josla, testa rezultāts ir nederīgs, un jums jāatkārto tests, izmantojot jaunu grūtniecības testu un rūpīgi ievērojot produkta lietošanas instrukcijas.

REZULTĀTA INTERPRETĀCIJA PĒC ABU TESTU VEIKŠANAS

- » Ja pēc abu testu (plūsmas un kasetītes) veikšanas saņemat divus pozitīvus rezultātus, visticamāk, esat stāvoklī.
- » Ja pēc abu testu veikšanas saņemat divus negatīvus rezultātus, visticamāk, neesat stāvoklī.
- » Ja pēc abu testu veikšanas saņemat atšķirīgus rezultātus (viens pozitīvs, otrs negatīvs), tas nozīmē, ka rezultāts ir neskaidrs – konsultējieties ar ārstu.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI (BUJ)

Kā darbojas grūtniecības tests?

Grūtniecības tests nosaka cilvēka horiona gonadotropīnu (hCG). tas ir hormons, ko sievietes organisms sāk ražot grūtniecības laikā. grūtniecības attīstoties, hCG koncentrācija urīnā palielinās.

Kadā brīdī man vajadzētu veikt grūtniecības testu, ja es aizdomājos, ka esmu stāvoklī?

Pink super jutīgais plūsmas grūtniecības tests var parādīt grūtniecību jau 6 dienas pēc apaugļošanas. pink kasetītes grūtniecības tests vislabāk veikts pirmajā paredzēto mēnešreizu dienā.

Vai man vajadzētu veikt testu ar rīta urīnu?

Ja vēl nav pagājuši pirmā paredzētā mēnešreizu diena, vislabāk veikt „pink super sensitive” plūsmas grūtniecības testu un „pink” kasetītes grūtniecības testu ar rīta urīnu, jo tajā ir visvairāk hCG. pēc pirmās paredzētās mēnešreizu dienas varat veikt „pink super sensitive” plūsmas grūtniecības testu un „pink” kasetītes grūtniecības testu jebkurā diennakts laikā.

Cik precīzi ir Pink DUO testi (kasetītes + plūsmas)

Klīniskie pētījumi liecina, ka pink duo testu precizitāte ir virs 99 %.

Cik jutīgi ir Pink DUO testi (kasetītes + plūsmas)?

„Pink super sensitive” plūsmas grūtniecības tests atklāj hCG, kad tā koncentrācija ir vienāda vai lielāka par 10 mIU/ml, bet „pink” grūtniecības kasetītes tests – kad tā koncentrācija ir vienāda vai lielāka par 20 mIU/ml. „pink duo 2” grūtniecības testi, gan kasetītes, gan plūsmas, ir standartizēti saskaņā ar pvo starptautisko standartu. pētījumi liecina, ka „pink super sensitive” un „pink” grūtniecības testu rezultātus neietekmē hormoni lh (līdz 300 mIU/ml), fsh (līdz 1000 mIU/ml) un tsh (līdz 1000 qIU/ml).

Kā uzzināt, vai tests darbojas pareizi?

Krāsainas līnijas parādīšanās kontroles zonā C norāda, ka jūsu izmantotais tests darbojas pareizi. kontroles līnijas C esamība arī norāda, ka tests tika veikts pareizi.

Kādi faktori var ietekmēt grūtniecības testa rezultātus?

Tādu medikamentu lietošana, kuru sastāvā ir hCG hormons (piemēram, „Pregnyl”, „Profasi”, „Pergonal”, APL), var izraisīt kļūdaini pozitīvus rezultātus. Alkohols, perorālie kontracepcijas līdzekļi, pretsāpju līdzekļi, antibiotikas vai hormonālie medikamenti, kuru sastāvā nav hCG, parasti neietekmē testa rezultātus. Noteikti veselības stāvokļi, piemēram, olnīcu cistas vai ārpusdzemdes grūtniecība, var izraisīt paaugstinātu hCG līmeni, kas var novest pie kļūdaini pozitīviem rezultātiem. Spontāns aborts arī var ietekmēt grūtniecības testa rezultātus. Sievietēm menopauzes periodā tests „Pink Super Sensitive Stream” var uzrādīt kļūdaini pozitīvus rezultātus.

Ko darīt, ja grūtniecības tests rāda, ka neesmu stāvoklī?

Ja grūtniecības testa rezultāts ir negatīvs, tas nozīmē, ka urīnā nav konstatēts hCG hormons un, visticamāk, jūs neesat stāvoklī. Ja menstruācijas nesākas nedēļas laikā, veiciet otru grūtniecības testu. Ja atkal saņemat negatīvu rezultātu un menstruācijas joprojām nav sākušās, konsultējieties ar ārstu.

Ko darīt, ja grūtniecības testa rezultāts rāda, ka esmu stāvoklī?

Pozitīvs grūtniecības tests nozīmē, ka jūsu urīnā ir hCG hormons un, visticamāk, esat stāvoklī. Varat veikt otru grūtniecības testu pēc nokavētajām menstruācijām. Ja saņemat otro pozitīvu rezultātu, jums jāgriežas pie ārsta, lai to apstiprinātu un pārrunātu turpmākos soļus.

Ko darīt, ja pēc diviem grūtniecības testiem esmu saņēmis neskaidru rezultātu?

Ja pēc diviem grūtniecības testiem rezultāti ir neskaidri, jums jā konsultējas ar ārstu.

Pēdējās lapas pārbaudes datums: 2022-06-22,

3AT versija

SYMBOLU SKAIDROJUMS

	Pirms veikt analīzi, izlasiet instrukciju		Tikai in vitro diagnostikai.
	Tikai vienreizējai lietošanai.		Uzglabāt temperatūrā no 2 līdz 30
	Sērijas numurs		Derīguma termiņš

CE 1434



Ražotājs:
Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.
ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61A
04-028 Varšuva
www.hydrex.pl



YouTube
Zobacz jak wykonać test
oraz interpretować wyniki na:
[www.youtube.com
/domowelaboratorium](https://www.youtube.com/domowelaboratorium)

INFOLINIA
801 000 977

**domowe
laboratorium**
OD 1987 ROKU