

PIRMS VEICAT TESTU, RŪPĪGI IZZLASIET IEPAKOJUMA LAPU

PINK GRŪTNIECĪBAS TESTA KASETE

Medicīnas ierīce pašpārbaudei

IEVADS

Pink® grūtniecības testa kasete ir ātrs un ļoti jutīgs tests grūtniecības noteikšanai, kas paredzēts cilvēka horiongonadotropīna (hCG) hormona noteikšanai urīnā grūtniecēm. Tests darbojas, pamatojoties uz hCG hormona reakciju ar monoklonālajiem anti-hCG antivielām, kas ir uzklātas uz testa kasetes. „Pink” grūtniecības testa kasetes lietošana ir ļoti vienkārša — nepieciešams uzpildināt trīs pilienus urīna uz testa kasetes. Rezultāts, kas parādās kā krāsainas līnijas testa joslas rezultātu logā, tiek iegūts 2–5 minūšu laikā.

IEPAKOJUMA SATURS

Iepakojumā ir līdzekļi vienam testam veikt:

- » 1 hermētiski noslēgts folijas maisiņš, kurā atrodas: 1 testa strēmele, 1 pipete un 1 žāvētājs
- » 1 lietošanas instrukcija

Pirms testa veikšanas sagatavojiet pulksteni, kas būs nepieciešams testa rezultāta mērīšanai.



PĀRBAUDES VEIKŠANA

Pārbaude tiek veikta, izmantojot svaigi savāktu urīnu. Vislabāk izmantot rīta urīnu, jo tajā ir visaugstākā hCG koncentrācija.


Pārbaudāmais urīns jāievēc tīrā un sausā traukā.

» Pirms pārbaudes veikšanas atveriet folijas maisiņu. Izņemiet testa kaseti un plastmasas pipeti no maisiņa. Maisiņā atrodas arī žāvētājs, kuru jāizmet sadzīves atkritumos.


» Novietojiet testa kaseti uz horizontālas virsmas

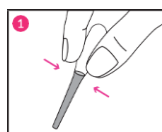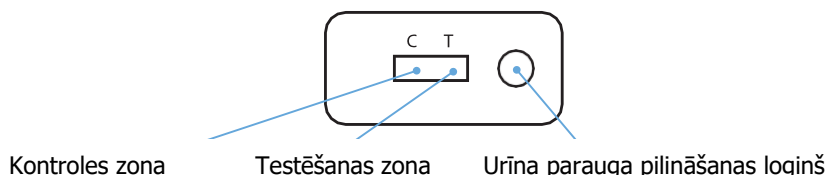

» Iemērciet plastmasas pipetes galiņu testējamajā urīnā. Saspiediet pipetes augšdaļu un uzņemiet urīn (1).

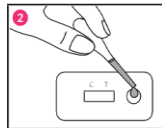

» Lēnām iepilniet 3 pilnus urīna pilienus apaļajā logiņā uz testa plāksnes (2). Lai nodrošinātu pareizu testa veikšanu, turiet pipeti vertikāli aptuveni 1 cm virs testa plāksnes virsmas, lai veidotos lielas, brīvi krītošas pilienus lāses bez gaisa burbuļiem.

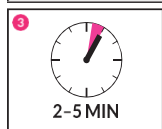


» Novērojiet testa urīna parauga kustību uz filtra papīra caur testa zonu T un kontroles zonu C.

Gaidiet, līdz rezultātu logā parādīsies krāsainas līnijas. Testa rezultātu nolasiet 2–5 minūtes pēc urīna ielaišanas apaļajā testa plāksnes logā. (3).

Ja krāsainas līnijas neparādās, pagaidiet vēl vienu minūti. **Rezultātus, kas iegūti pēc 10 minūtēm, nevērtējiet.**

TESTA REZULTĀTU SKAIDROJUMS

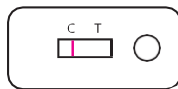

Negatīvs rezultāts (jūs neesat stāvoklī)

Parādās kontroles līnija C, bet testa līnija T neparādās. Šis rezultāts norāda, ka jūs, visticamāk, neesat stāvoklī.



Pozitīvs rezultāts (grūtniecība)



Parādās divas atšķirīgas līnijas: testa zonā T un kontroles zonā C. T līnijas krāsas intensitāte nav svarīga; tā var būt tāda pati, vājāka vai spēcīgāka nekā C līnijas krāsas intensitāte. Šis rezultāts norāda, ka jūs, visticamāk, esat stāvoklī.



Nederīgs rezultāts



Ja līnijas neparādās vai parādās tikai testa līnija T, testa rezultāts ir nederīgs, un testu jāatkārto, izmantojot jaunu grūtniecības testu un rūpīgi ievērojot produkta lietošanas instrukcijas.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

- » Tests paredzēts tikai ārējai lietošanai.
- » Testa iepakojumu glabāiet temperatūrā no 2 līdz 30 °C (36–86 °F). Nelieciet saldētavā. Pirms testa veikšanas uzglabāiet iepakotu testu istabas temperatūrā
- » Nelietojiet testa pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma
- » Nelietojiet testa, ja folijas iepakojums ir bojāts, jo mitrums no gaisa varēja bojāt testu.
- » Tests paredzēts tikai vienreizējai lietošanai
- » Izlietoto testu izmetiet kā parastas sadzīves atkritumus.
- » Testu glabāiet bērniem nepieejamā vietā
- » Pēc grūtniecības testa veikšanas neveiciet nekādas medicīniskas darbības bez konsultēšanās ar ārstu

ATBILDES UZ VISBIEŽĀK UZDOTIEM JAUTĀJUMIEM

Kā darbojas grūtniecības tests?

Grūtniecības tests urinā nosaka hormonu hCG (cilvēka horiona gonadotropīnu). Sievietes organisms sāk ražot šo hormonu, ja viņa ir stāvoklī. Grūtniecības laikā hCG koncentrācija urinā palielinās.

Kad man vajadzētu veikt grūtniecības testu, ja varu būt stāvoklī?

Pink grūtniecības testu vislabāk veikt pirmajā dienā pēc kavētiem mēnešreizēm.

Vai man jāveic tests ar rīta urīnu?

Pink grūtniecības testu var veikt jebkurā diennakts laikā, taču vislabāk ir izmantot rīta urīnu, jo tajā ir visaugstākā hCG koncentrācija.

Cik precīzs ir Pink grūtniecības tests?

Kliniskie pētījumi rāda, ka Pink grūtniecības testa rezultāti ir precīzi vairāk nekā 99,9%.

Kāda ir Pink grūtniecības testa jutība?

Rozā grūtniecības tests nosaka hCG koncentrāciju, kas ir vienāda vai lielāka par 20 mIU/ml. Rozā tests ir standartizēts saskaņā ar PVO starptautisko standartu. Ir pētīts citu urīnā esošo hormonu ietekme uz testa rezultātiem. Ir konstatēts, ka LH (līdz 300 mIU/ml), FSH (līdz 1000 mIU/ml) vai TSH (līdz 1000 µIU/ml) neietekmē Pink grūtniecības testa rezultātus.

Kā zināt, vai tests darbojas pareizi?

Krāsainas līnijas parādīšanās kontroles zonā (C) norāda, ka jūsu izmantotais tests darbojas pareizi. Kontroles līnijas (C) esamība arī nozīmē, ka tests ir veikts pareizi.

Kādi faktori var ietekmēt grūtniecības testa rezultātus?

Zāļu lietošana, kas satur hCG (piemēram, "Pregnyl", "Profasi", "Pergonal", APL), var izraisīt kļūdaini pozitīvus rezultātus. Alkohols, kontracepcijas tabletes, pretsāpju līdzekļi, antibiotikas vai hormonu zāles, kas nesatur hCG, rezultātus neietekmē. Turklāt dažādi apstākļi, piemēram, olnīcu cistas vai ārpusdzemdes grūtniecība, var paaugstināt hCG līmeni, kas var radīt kļūdaini pozitīvus rezultātus.

Ko man darīt, ja mans grūtniecības testa rezultāts rāda, ka neesmu stāvoklī?

Ja tests ir negatīvs, tas nozīmē, ka jūsu urīnā nav konstatēts hCG, un, visticamāk, jūs neesat stāvoklī. Ja mēnešreizes kavējas vairāk nekā nedēļu, veiciet jaunu grūtniecības testu. Ja rezultāts joprojām ir negatīvs un mēnešreizes neparādās, konsultējieties ar ārstu. Spontāni aborti var arī ietekmēt grūtniecības testa rezultātus.

Ko man darīt, ja mans grūtniecības testa rezultāts rāda, ka esmu stāvoklī?

Pozitīvs grūtniecības testa rezultāts nozīmē, ka jūsu urīnā ir hCG un jūs, visticamāk, esat stāvoklī. Jums jāapmeklē ārsts, lai to apstiprinātu un uzzinātu, kā rīkoties tālāk.

Pēdējoreiz atjaunots: 2022. gada 20. jūnijā

7AT versija

CE 1434

SIMBOLI

	Pirms testa veikšanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju		Tikai in vitro diagnostikai
	Vienreizējai lietošanai		Uzglabāt temperatūrā no 2 līdz 30 °C
	Partijas numurs		Derīguma termiņš



Ražotājs:

Hydrex Diagnostics Sp. z o. o.
Alcja Spółdzielnia Zjednoczonych 61a
www.hydrex.pl
04-028 Warszawa

INFOLINIA
801 000 977

domowe
laboratorium
OD 1987 ROKU

Platintojas Lietuvoje:
MB Euromedika
info@euromedika.lt
+370 5 2151418